

Contour next

Sistema para análisis de glucosa en sangre



Su medidor CONTOUR®NEXT



Tira reactiva CONTOUR®NEXT

PRECAUCIÓN: Utilice únicamente tiras reactivas CONTOUR NEXT con el medidor CONTOUR NEXT.

Para ver una lista completa de las advertencias importantes y de las limitaciones de su sistema, consulte las 5 primeras páginas de la guía del usuario de su medidor CONTOUR®NEXT, especialmente INDICACIONES DE USO, INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES.

Encender o apagar el medidor

- Pulse y mantenga pulsado el botón **OK** hasta que el medidor se encienda o se apague.
- El medidor se encenderá al introducir una tira reactiva en el puerto para la tira reactiva.

Botones de desplazamiento arriba / abajo y OK

- Los botones de desplazamiento ▲ o ▼ le permiten cambiar valores u opciones de uno en uno. Puede mantener pulsado el botón ▲ o ▼ para desplazarse.
- Pulse el botón **OK** para seleccionar la opción resaltada.
- Para salir de Registro o Tendencias y volver al Menú Principal, pulse el botón **OK**.
- Para salir de la Configuración y volver al Menú Principal, desplácese hacia abajo hasta **Menú Principal** y pulse el botón **OK**.



Configuración inicial del medidor

Es necesario configurar el medidor antes de realizar el primer análisis de glucosa en sangre.






Una pantalla confirma su elección. Pulse el botón **OK** para continuar.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón **OK** hasta que el medidor se encienda.
2. Si fuera necesario, pulse el botón ▼ para resaltar el idioma deseado. Desplácese hacia abajo para ver más idiomas. Pulse el botón **OK** para confirmar su elección.

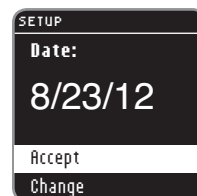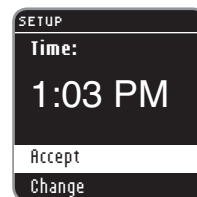

3. Se mostrará la hora y puede elegir **Aceptar** o **Cambiar**. Para cambiar la hora, utilice el botón ▼ para seleccionar **Cambiar** y pulse el botón **OK**. Utilice los botones ▲ o ▼ para cambiar los valores y pulse el botón **OK** para pasar al siguiente elemento. Una pantalla confirma su elección. Pulse el botón **OK** para pasar a la configuración de la fecha.

4. Se mostrará la fecha y puede elegir **Aceptar** o **Cambiar**. Para cambiar la fecha, utilice el botón ▼ para seleccionar **Cambiar** y pulse el botón **OK**. Utilice los botones ▲ o ▼ y pulse el botón **OK** para pasar al siguiente elemento.

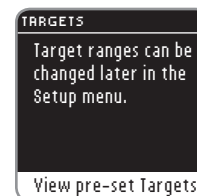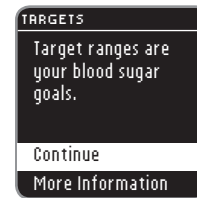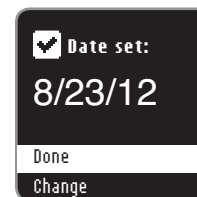

Cuando haya realizado la selección, una pantalla confirmará la fecha elegida. Pulse el botón **OK** para pasar a Objetivos.

5. Pulse el botón **OK** para continuar.

6. Cuando haya completado la configuración inicial, puede cambiar los intervalos del Objetivo mediante el menú de Configuración. Pulse el botón **OK** para continuar.



7. Pulse el botón **OK** para continuar con el intervalo Objetivo Antes Comer.

8. Pulse el botón **OK** para continuar con el intervalo Objetivo Después Comer.

9. Pulse el botón **OK** para **completar la configuración inicial**. Ahora puede medir su glucosa en sangre.



GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

Análisis de glucosa en sangre - en la yema del dedo

PRECAUCIÓN


Lávese siempre las manos con agua y jabón cuidadosamente antes y después de realizar un análisis, manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.

PRECAUCIÓN: El dispositivo de punción suministrado con su kit está diseñado para el autodiagnóstico por un solo paciente. No se debe utilizar en más de una persona debido al riesgo de infección.


1. Quite la cápsula de punción del dispositivo de punción.




2. Afloje la cubierta protectora redonda de la lanceta mediante un giro de ¼ de vuelta, pero no la retire.

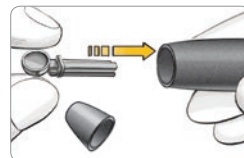


3. Introduzca con firmeza la lanceta en el dispositivo de punción hasta que se detenga.

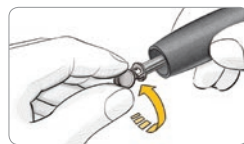


4. Gire la cubierta protectora redonda de la lanceta para separarla.

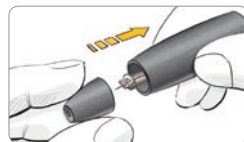

5. Vuelva a colocar la cápsula de punción.

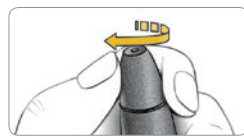

6. Ajuste el cilindro de graduación de la cápsula de punción a la profundidad de punción preferida.

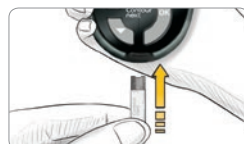


7. Introduzca el extremo cuadrado gris en el puerto para la tira reactiva.

El medidor se encenderá y aparecerá la pantalla **Aplicar sangre**. El medidor ya está listo para realizar el análisis.



Aplice un masaje en la mano y el dedo en dirección al lugar de punción para que se forme una gota de sangre.

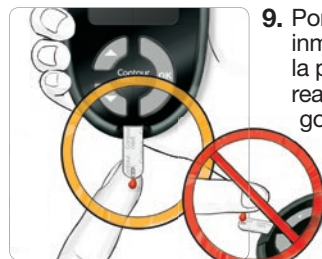


Si la primera gota de sangre no es suficiente, el medidor emitirá dos pitidos. Dispone de unos 30 segundos para recoger más sangre en la misma tira reactiva. Siga las instrucciones de la pantalla del medidor.

8. Presione el dispositivo de punción firmemente contra el lugar de punción y pulse el botón de expulsión.

9. Ponga en contacto inmediatamente la punta de la tira reactiva con la gota de sangre.



10. Aparecerá la pantalla AutoLog*. Seleccione **Sin Marcador, Ayunas, Antes Comer o Después Comer** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

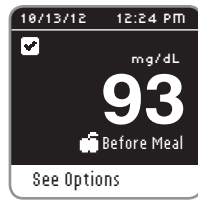

Cuando haya realizado la selección, aparecerá el resultado del análisis.

Ya ha completado el análisis y se ha marcado el resultado del análisis.

Si el resultado está por encima o por debajo de los intervalos Objetivo configurados, verá siempre el resultado sin necesidad de pulsar ningún botón.

11. Para ver las opciones de configuración de un recordatorio o agregar una nota, pulse el botón **OK** antes de extraer la tira reactiva.

Consulte la guía del usuario para obtener las instrucciones de uso de las opciones. Para apagar el medidor, extraiga la tira reactiva.

PRECAUCIÓN: Para obtener instrucciones detalladas sobre la retirada de la lanceta del dispositivo de punción, consulte el folleto del dispositivo de punción proporcionado con su kit.

Pantalla Menú Principal

1. **Registro** estará resaltado. Para ver el registro, pulse el botón **OK**.



2. Para ver todas las medias y los resúmenes, pulse el botón ▼ para seleccionar **Tendencias** y pulse el botón **OK**.

3. Para cambiar o ajustar la configuración del medidor, seleccione **Configuración** y pulse el botón **OK**.

* El medidor viene con la función AutoLog activada. Consulte la guía del usuario para obtener información sobre la función AutoLog.

El medidor está configurado y bloqueado de fábrica para mostrar los resultados en mg/dL. Si el resultado es en mmol/L, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente en el 1-800-348-8100 (disponible de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, hora del Este).

Para obtener más información, visite www.diabetes.ascensia.com o llame al Servicio de atención al cliente al: **1-800-348-8100** (disponible de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, hora del Este).

Consulte la guía del usuario del medidor **CONTOUR®NEXT** y el folleto del dispositivo de punción para obtener instrucciones completas.

Para uso diagnóstico in vitro



Distribuidor:
Ascensia Diabetes Care US, Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ 07054
www.diabetes.ascensia.com

Para obtener información sobre las patentes y otras licencias relacionadas, consulte: www.patents.ascensia.com

Posible riesgo biológico

Se considera que todos los sistemas de medición de glucosa en sangre representan un posible riesgo biológico.

Todos los productos u objetos que entren en contacto con la sangre humana deberán manipularse, incluso después de limpiarlos, como potenciales transmisores de enfermedades infecciosas.

El medidor y el dispositivo de punción son para uso en un solo paciente. ¡No los comparta con nadie, ni siquiera con miembros de su familia! Se considera que todas las partes del kit presentan un posible riesgo biológico y podrían transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de haberlas limpiado y desinfectado. Lávese siempre las manos con agua y jabón cuidadosamente antes y después de manipular el medidor, el dispositivo de punción o la tira reactiva.

Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones completas.

Ascensia, el logotipo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts y el logotipo de No Coding (No Necesita Código) son marcas y/o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados.

85303716 Rev. 11/16