

Contour
next ONE
Sistema para análisis
de glucosa en sangre

Funciona con la **CONTOUR®DIABETES**
app gratuita.

La información sobre la garantía y el proceso
de registro del medidor están disponibles en
www.diabetes.ascensia.com/warranty
o llame al servicio de atención al cliente.



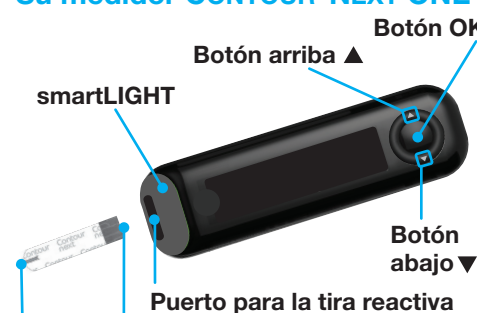
Segunda
Muestra

NO NECESITA
CÓDIGO

GUÍA DE
CONSULTA
RÁPIDA

Utilizar exclusivamente
con las tiras reactivas
de glucosa en sangre
CONTOUR®NEXT.

Su medidor CONTOUR®NEXT ONE



Extremo cuadrado gris: introduzca este extremo en el puerto para la tira reactiva

Punta para muestra: Aquí se absorbe la muestra de sangre

ATENCIÓN

El medidor CONTOUR NEXT ONE funciona exclusivamente con las tiras reactivas de glucosa en sangre CONTOUR®NEXT y la solución de control CONTOUR®NEXT.

Lea la guía del usuario de CONTOUR NEXT ONE para conocer el uso previsto del medidor y una lista de información importante de seguridad, advertencias, limitaciones y precauciones.

CONTOUR®DIABETES app

Puede transferir automáticamente los resultados de su medidor CONTOUR NEXT ONE a su teléfono o tableta de forma inalámbrica.

- En su teléfono o tableta, vaya a App Store® o Google Play™ store.
- Busque la CONTOUR DIABETES app.
- Instale la CONTOUR DIABETES app y siga las instrucciones para emparejar su medidor.

O escanee el código QR con una app o visite www.diabetes.ascensia.com para obtener más información.

NOTA: Si no empareja el medidor con la CONTOUR DIABETES app, siga las instrucciones incluidas en *Configuración inicial del medidor* la primera vez que encienda su medidor.

Encienda y apague el medidor

- Pulse y mantenga pulsado el **botón OK** durante 3 segundos hasta que el medidor se **encienda** o se **apague**.
O BIEN
- Introduzca una tira reactiva en el medidor para **encenderlo**.
- Para **encender** la luz blanca del puerto para la tira reactiva, pulse **OK** dos veces cuando el medidor esté **apagado**.

Botones de desplazamiento arriba/abajo y OK



- Los **botones** ▲ y ▼ del anillo exterior permiten desplazarse por las opciones.

- Cuando un símbolo esté **parpadeando**, podrá seleccionarlo o cambiarlo.



- Pulse el **botón OK** para aceptar una selección.

Configuración inicial del medidor

Mantenga pulsado el **botón OK** durante 3 segundos hasta que el medidor se encienda.



NOTA: La pantalla se atenúa transcurridos 30 segundos de inactividad. Para iluminar de nuevo la pantalla, pulse el **botón OK**.

La configuración inicial comienza con **Ver el Intervalo objetivo Global predefinido**.

1 Ver el Intervalo objetivo Global predefinido

El medidor compara sus resultados de glucosa en sangre con un **Intervalo objetivo** (por ejemplo, 70 mg/dL – 130 mg/dL) para indicarle si el resultado del análisis está:

- en el **Intervalo objetivo**.
- por encima del **Intervalo objetivo**.
- por debajo del **Intervalo objetivo**.

Puede cambiar este **Intervalo objetivo** predefinido con la CONTOUR DIABETES app tras la configuración inicial del medidor.

El medidor muestra un valor predefinido del **Intervalo objetivo Global**.

- Para desplazarse hasta la siguiente pantalla, pulse el **botón OK**. Continúe a *Fijar la hora*.

2 Fijar la hora

La hora **parpadea**.

- Para cambiar la hora, pulse el **botón** ▲ o ▼ en el anillo exterior.



- Para fijar la hora y pasar a los minutos, pulse el **botón OK**.
- Para cambiar los minutos, pulse el **botón** ▲ o ▼ en el anillo exterior, y a continuación pulse el **botón OK**.

Para el formato de 12 horas, seleccione **AM** o **PM**, pulse el **botón** ▲ o ▼ en el anillo exterior, y a continuación pulse el **botón OK**.

3 Fijar la fecha

El año **parpadea**.

- Para cambiar el año, pulse el **botón** ▲ o ▼, y a continuación pulse el **botón OK**.



- Para cambiar el mes, pulse el **botón** ▲ o ▼, y a continuación pulse el **botón OK**.
- Para cambiar el día, pulse el **botón** ▲ o ▼, y a continuación pulse el **botón OK**.

4 La configuración ha finalizado

El medidor muestra brevemente los ajustes guardados y a continuación emite un pitido y se **apaga**.



La configuración ha finalizado.

Análisis en la yema de los dedos

Consulte el folleto del dispositivo de punción para obtener instrucciones detalladas sobre cómo preparar dicho dispositivo de punción.

ADVERTENCIA: Posible riesgo biológico

- Lávese siempre las manos con agua y jabón cuidadosamente y séquelas bien antes y después de realizar un análisis o después de manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.
- Se considera que todos los componentes de este kit presentan un riesgo biológico y pueden potencialmente transmitir enfermedades infecciosas.

- Si una segunda persona va a manipular el medidor para ayudarle a realizar el análisis, el medidor y el dispositivo de punción deberán desinfectarse antes de que los utilice esta segunda persona.

Para más información, consulte la guía del usuario de CONTOUR NEXT ONE.

ATENCIÓN

- El dispositivo de punción suministrado normalmente con su kit está diseñado para uso por un solo paciente.
 - Configure el medidor antes de realizar el primer análisis de glucosa en sangre. Consulte *Configuración inicial del medidor*.
- Para más información, consulte la guía del usuario de CONTOUR NEXT ONE.

- Prepare el dispositivo de punción. Consulte el folleto del dispositivo de punción para obtener instrucciones detalladas.
- Introduzca con firmeza el extremo cuadrado gris de una tira reactiva nueva en el puerto para la tira reactiva hasta que el medidor emita un pitido.



El medidor se enciende y muestra la pantalla para **aplicar la sangre**. El medidor ya está listo para analizar una gota de sangre.



- Utilice el dispositivo de punción para obtener una gota de sangre de la yema del dedo.
- Aplique un masaje en la mano y el dedo en dirección al lugar de punción para que se forme una gota de sangre.

- Ponga en contacto inmediatamente la punta de la tira reactiva con la gota de sangre.

- Si el medidor emite dos pitidos y la pantalla muestra una gota de sangre que **parpadea**, la tira reactiva no tiene suficiente sangre. Aplique más sangre a la tira reactiva antes de que transcurran 60 segundos.

Consulte el dorso de esta página para continuar con el *Análisis en la yema de los dedos* y aprenda sobre los *Marcadores de comidas*.

¿Necesita ayuda?

Para obtener más información, visite www.diabetes.ascensia.com

El servicio de atención al cliente está disponible de lunes a domingo, de 8.00 a.m. a 12.00 a.m., hora del este.

El medidor está configurado y bloqueado de fábrica para mostrar los resultados en mg/dL. Si los resultados se muestran en mmol/L, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente: 1-800-348-8100, de lunes a domingo, de 8.00 a.m. a 12.00 a.m., hora del este.

ASCENSIA
Diabetes Care

Distribuido por:
Ascensia Diabetes Care US Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ 07054

Para diagnóstico in vitro.

Para obtener información sobre las patentes y otras licencias relacionadas, consulte www.patents.ascensia.com.

Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, el logotipo de No Coding (No Necesita Código), Second-Chance y el logotipo de la toma de muestras Second-Chance (Segunda Muestra), Smartcolor y Smartlight son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.




La marca **Bluetooth**® y los logotipos son marcas registradas, propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de dichas marcas por Ascensia Diabetes Care se realiza en virtud de una licencia de uso. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. No debe inferirse ni considerarse implícita ninguna relación ni aprobación.

Análisis en la yema de los dedos, continuación

ATENCIÓN

Para obtener instrucciones detalladas sobre la retirada de la lanceta del dispositivo de punción, consulte el folleto del dispositivo de punción.

El medidor muestra el resultado con las unidades, hora, fecha e indicador de objetivo: En objetivo , Por debajo del objetivo  o Por encima del objetivo .



El puerto para la tira reactiva muestra un color que representa su resultado en comparación con el **Intervalo objetivo**.



En objetivo

Por debajo del objetivo

Por encima del objetivo

Resultados LO (Bajo) o HI (Alto)

- Si el medidor no muestra un valor y muestra la pantalla **LO** (Bajo), la lectura de glucosa en sangre está por debajo de 20 mg/dL. **Póngase inmediatamente en contacto con su profesional de la salud.**



- Si el medidor no muestra un valor y muestra la pantalla **HI** (Alto), la lectura de glucosa en sangre está por encima de 600 mg/dL. Lávese las manos o lave el sitio del análisis y repítalo con una tira reactiva nueva. Si el medidor vuelve a mostrar la pantalla **HI** (Alto), **siga las recomendaciones de su médico inmediatamente.**



Para apagar el medidor, extraiga la tira reactiva.



Registro

- Para encender el medidor, mantenga pulsado el **botón OK** durante 3 segundos.





La pantalla **Inicio** tiene 2 opciones: **Registro** y **Configuración**.

El **Registro**  parpadea.

- Para ver las entradas del **Registro**, pulse el **botón OK**.
- Pulse los **botones**  y  en el anillo exterior para desplazarse por el **Registro**.

Configuración



Puede activar o desactivar los ajustes tales como **Sonido** y **Luz de objetivo** (**smartLIGHT™**) en **Configuración**.

- Para resaltar el símbolo **Configuración**  de la pantalla **Inicio**, pulse el **botón**  en el anillo exterior.
- Cuando el símbolo **Configuración** esté **parpadeando**, pulse el **botón OK** para entrar en **Configuración**.

- Continúe pulsando el **botón OK** en cada ajuste hasta llegar al que desee cambiar.

Puede cambiar los siguientes ajustes:

- Formato de hora
- Hora
- Formato de fecha
- Fecha
- Sonido
- Marcadores de comidas
- Intervalos objetivo (ver únicamente)
- Luces de objetivo (smartLIGHT)
- Bluetooth®**

- Cuando encuentre el ajuste que desee cambiar, pulse el **botón**  o  en el anillo exterior para activar o desactivar el ajuste o para cambiar el valor.



- Para aceptar el cambio, pulse el **botón OK**.

Para salir del **Registro** o de la última pantalla **Configuración** y regresar a **Inicio**, pulse el **botón OK**.

Active los Marcadores de comidas


Si el medidor no está **encendido**:

- Mantenga pulsado el **botón OK** unos 3 segundos hasta que el medidor se encienda.



- Espere hasta que el símbolo del **Registro** esté **parpadeando** en la pantalla **Inicio**.



- Pulse el **botón**  en el anillo exterior.




- Cuando el símbolo **Configuración** esté **parpadeando**, pulse el **botón OK**.

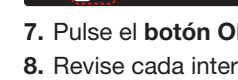


- Continúe pulsando el **botón OK** en cada ajuste hasta que vea la pantalla de configuración **Marcador de comidas**.



No pulse el **botón OK** todavía.

- Pulse el **botón**  o  de forma que **On** (marcadores activados) **parpadee**.



- Pulse el **botón OK**.



La función **Marcador de comidas** está **activada**.

Seleccione un Marcador de comidas durante un análisis de glucosa en sangre





NOTA: Antes de poder seleccionar un **Marcador de comidas**, deberá realizar un análisis de glucosa en sangre. **No se puede seleccionar un Marcador de comidas en Configuración.**

- Realice un análisis de glucosa en sangre. Consulte el apartado *Análisis en la yema de los dedos* de esta guía.
- No retire la tira reactiva hasta que haya seleccionado un **Marcador de comidas**.

En la pantalla de resultados de glucosa en sangre parpadea un **Marcador de comidas**:



- Si el **Marcador de comidas** que está **parpadeando** es el que usted desea, pulse el **botón OK**.

Para seleccionar un **Marcador de comidas** diferente, pulse el **botón**  o  en el anillo exterior para desplazarse por los marcadores.

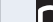
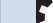
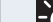
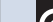
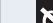
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
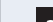


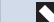

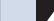
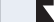
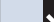

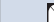
- Cuando el **Marcador de comidas** que desee esté **parpadeando**, pulse el **botón OK**.

NOTA:

- Si no selecciona un **Marcador de comidas** en 30 segundos, la pantalla se atenúa. Pulse cualquier botón para volver a encender la pantalla y realizar una selección.
- Si no selecciona un **Marcador de comidas** en 3 minutos, el medidor se apaga. Su lectura de glucosa en sangre se almacena en el **Registro** sin un **Marcador de comidas**.

La pantalla del medidor

Símbolo	Significado
	Registro
	Configuración
	Configuración de la luz de objetivo (smartLIGHT) (Verde=En objetivo; Rojo=Por debajo del objetivo; Amarillo=Por encima del objetivo)
	Se muestra el intervalo o la configuración de objetivo
	Marcador de comidas en ayunas, se utiliza al realizar un análisis después de ayunar (no comer ni beber durante 8 horas, excepto agua y bebidas no calóricas)
	Marcador Antes de comer, se utiliza al realizar un análisis 1 hora antes de una comida
	Marcador Después de comer, se utiliza al realizar un análisis 2 horas después del primer bocado de una comida

Símbolo	Significado
	Se ha seleccionado Sin marca, se utiliza al realizar un análisis en cualquier otro momento que no sea después de ayunar o antes o después de una comida
	El resultado del análisis de la glucosa en sangre está en el Intervalo objetivo
	El resultado del análisis de la glucosa en sangre está por encima del Intervalo objetivo
	El resultado del análisis de la glucosa en sangre está por debajo del Intervalo objetivo
	Símbolo Bluetooth , indica que la función de Bluetooth está activada; el medidor se puede comunicar con un dispositivo móvil
	Las pilas están casi descargadas y necesitan cambiarse
	Error del medidor