


# Contour next EZ

Sistema para análisis de glucosa en sangre

El registro en línea del medidor está disponible en [www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com) o llamando a nuestro Servicio de atención al cliente.

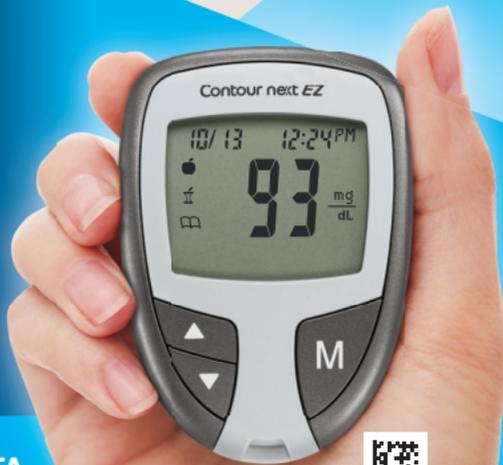

**NO CODING**

**GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA**


## Medidor CONTOUR®NEXT EZ



Use exclusivamente las tiras reactivas de glucosa en sangre CONTOUR®NEXT

**Extremo gris:** Introduzca este extremo en el puerto para la tira reactiva.

**Punta para muestra:** La muestra de sangre se recoge aquí.

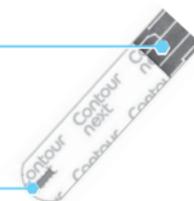


Para ver una lista completa de las advertencias importantes y de las limitaciones de su sistema, consulte las secciones de USO PREVISTO, INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES de la guía del usuario de su medidor CONTOUR®NEXT EZ.

## Análisis básico

### Prepararse para realizar un análisis

1. Lávese siempre las manos cuidadosamente con agua y jabón antes y después de manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.

2. Introduzca el extremo gris de la tira reactiva en el puerto para la tira reactiva del medidor.

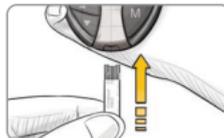


3. El medidor se enciende y aparece la imagen de una tira reactiva con una gota de sangre parpadeante, que indica que el medidor está listo para realizar el análisis.

4. Saque la cápsula de punción del dispositivo de punción.

5. Afloje la cubierta protectora redonda de la lanceta mediante un giro de ¼, pero no la retire.



6. Introduzca con firmeza la lanceta hasta que se detenga completamente.

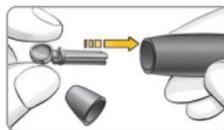


7. Gire la cubierta protectora redonda de la lanceta para separarla.



8. Vuelva a colocar la cápsula de punción.



9. Ajuste el cilindro de graduación de la cápsula de punción a la profundidad de punción preferida.

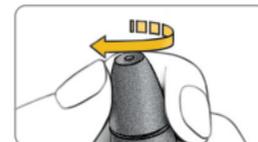

**PRECAUCIÓN: El medidor CONTOUR®NEXT EZ y el dispositivo de punción están diseñados para su uso en un solo paciente.**

### Extracción de la gota de sangre

1. Presione el dispositivo de punción firmemente contra el lugar de punción y presione el botón de expulsión.



2. Masajee la mano y el dedo en dirección al lugar de punción para que se forme una gota de sangre.

### Realizar el análisis de sangre


1. Use exclusivamente las tiras reactivas de glucosa en sangre CONTOUR®NEXT con el medidor CONTOUR®NEXT EZ.

2. Ponga en contacto la punta de la tira reactiva con la gota de sangre. La sangre se recoge en la tira reactiva.


3. Mantenga la tira reactiva en contacto con la gota de sangre hasta que el medidor emita un pitido.

4. El resultado aparece en pantalla después de 5 segundos.

5. Para apagar el medidor, simplemente extraiga la tira reactiva. Deseche la tira reactiva como residuo médico.

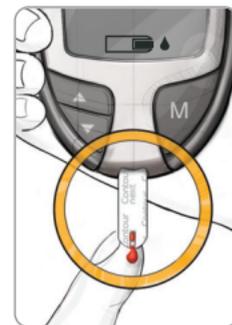

Análisis en la yema de los dedos

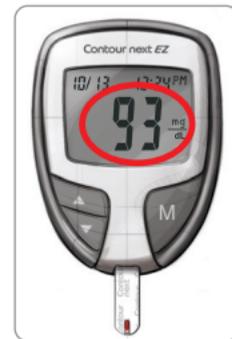

Consulte la guía del usuario de CONTOUR NEXT EZ y el folleto del dispositivo de punción para obtener instrucciones completas.

### Para sacar y desechar la lanceta usada

1. No utilice los dedos para retirar la lanceta del dispositivo de punción. El dispositivo de punción suministrado con el kit dispone de un mecanismo para la expulsión automática de la lanceta.



2. Consulte el folleto aparte del dispositivo de punción, si se incluye con su kit, para obtener instrucciones sobre la expulsión automática de la lanceta.

### ADVERTENCIA: Posible riesgo biológico

- Deseche siempre la tira reactiva y la lanceta como residuos médicos o como le indique su profesional sanitario. Todos los productos que entren en contacto con la sangre humana deberán manipularse como potenciales transmisores de enfermedades infecciosas.
- No reutilice las lancetas. Utilice una nueva lanceta cada vez que realice un análisis.
- Consulte el folleto del dispositivo de punción para obtener instrucciones sobre cómo retirar y desechar correctamente la lanceta.

### Posible riesgo biológico

Se considera que todos los sistemas de medición de glucosa en sangre representan un posible riesgo biológico.

Todos los productos y objetos que entren en contacto con la sangre humana deberán manipularse, incluso después de limpiarlos, como potenciales transmisores de enfermedades infecciosas.

El medidor y el dispositivo de punción están diseñados para el uso por un solo paciente. ¡No los comparta con nadie, ni siquiera con miembros de su familia!

Se considera que todas las partes del kit presentan un posible riesgo biológico y podrían transmitir enfermedades víricas, incluso después de haberlas limpiado y desinfectado.

Lávese siempre las manos cuidadosamente con agua y jabón y séqueselas bien antes y después de realizar un análisis y de manipular el medidor, el dispositivo de punción o la tiras reactivas.

Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones completas.

Para obtener información sobre las patentes y otras licencias relacionadas, consulte: [www.patents.ascensia.com](http://www.patents.ascensia.com)

Ascensia, el logotipo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts, y el logotipo de No Coding son marcas comerciales y/o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados.

## Uso del modo avanzado

### Configuración del medidor en modo avanzado

Para configurar el medidor en modo avanzado y sacar ventaja de los marcadores de comida y otras funciones disponibles:

1. Presione **M** para encender el medidor.
2. Pulse y mantenga presionado ▲ o ▼ durante 3 segundos.
3. L-1 parpadea.
4. Pulse ▲ o ▼ para cambiar a L-2.
5. Pulse **M** para establecer la configuración.



#### ¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente en el 1-800-348-8100

Este servicio está disponible de lunes a domingo de 8:00 de la mañana a 12:00 de la noche, hora del Este.

[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)

## Después de realizar un análisis y ver los resultados, use los marcadores en pantalla:

Cómo Marcar Los Resultados >	Verá >	Para Configurar >	Verá >	Lo Que Significa >	Uso Del Recordatorio
<b>Antes de las comidas</b> Marca el resultado de un análisis que se ha realizado antes de comer. Pulse ▲ o ▼	 (Parpadea)	Pulse <b>M</b>		El resultado se ha marcado como análisis antes de las comidas. Pulse <b>M</b> de nuevo para configurar un recordatorio que le recuerde que debe realizar un análisis después de comer.	Cuando suena el recordatorio, el medidor se enciende y puede ver el resultado del análisis antes de comer.
<b>Después de las comidas</b> Marca el resultado de un análisis que se ha realizado después de comer. Pulse ▲ o ▼	 (Parpadea)	Pulse <b>M</b>		El resultado se ha marcado como análisis después de las comidas.	
<b>Registro</b> Marca un resultado como único o diferente por algún motivo. Pulse ▲ o ▼	 (Parpadea)	Pulse <b>M</b>		El resultado se ha marcado en la memoria como único. Debe anotarlo en su registro.	Pulse cualquier botón una vez para silenciar el recordatorio y dos veces para apagar el medidor. Realice otro análisis de sangre y márkelo como  análisis después de las comidas (consulte la tabla de la izquierda).



Configure un recordatorio (preconfigurado en 2 horas) para realizar un análisis después de las comidas. Consulte la guía del usuario para obtener instrucciones completas sobre el uso de los marcadores y ajuste de las horas recordatorio.

## Códigos de error y símbolos

Consulte la guía del usuario para obtener una lista completa de los códigos de error.

<b>E1</b> 	Temperatura fuera del rango.
<b>E2</b> 	Hay un problema con la recogida completa de sangre en la tira reactiva. Repita el análisis usando una tira reactiva nueva.
<b>E3</b> 	El medidor detecta una tira reactiva usada o se ha utilizado una solución de control errónea. Repita el análisis usando una tira reactiva nueva.
<b>E11</b>	Resultado anormal. Repita el análisis usando una tira reactiva nueva.

**ASCENSIA**  
Diabetes Care

Distribuido por:  
Ascensia Diabetes Care US Inc.  
5 Wood Hollow Road  
Parsippany, NJ 07054  
[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)

90011723  
Rev. 10/23